

# COMMENT AGIR EN CAS D'ARRÊT CARDIAQUE ?

## ÉVALUER – ALERTER – SECOURIR

1. ?

Demandez de l'aide mettez-vous en sécurité ainsi que la victime.

**VÉRIFIEZ QUE LA PERSONNE RÉAGIT**

Demandez-lui de vous serrer les mains ou d'ouvrir les yeux  
**SINON**

2.



**VÉRIFIEZ QUE LA PERSONNE RESPIRE**

Vérifiez son souffle, sa poitrine se gonfle-t-elle ? Si elle respire mais reste inconsciente, mettez là en position latérale de sécurité (PLS) **SINON**

3.



**ALERTEZ LES SECOURS**

**FAITES LE 15, LE 18 OU LE 112**

Indiquez-leur précisément où vous êtes, le nombre de victimes, les symptômes et **NE RACCROCHEZ JAMAIS !**

4.



**COMMENCEZ LE MASSAGE CARDIAQUE**

**Utilisez le DÉFIBRILLATEUR, le plus vite possible**

5.



Dès que celui-ci arrive, appuyez sur le bouton vert et laissez-vous guider.

6.



Dénudez la poitrine du patient. Tirez sur la languette verte pour sortir les électrodes puis retirez le film plastifié des électrodes.

Appliquez les électrodes fermement sur la poitrine, comme indiqué. Écartez-vous du patient

7.



L'appareil procède à son analyse. **Ne touchez pas le patient.**

Si l'appareil vous le demande, appuyez sur le bouton de choc orange.

Un défibrillateur entièrement automatique administrera le choc lui-même, sans votre intervention

**Vous avez utilisé l'appareil ?**

**Appelez-nous pour :**


- Réinitialiser l'appareil
- Commander un nouveau Pad-Pak

8.



Puis procédez au massage cardiaque jusqu'à ce que l'appareil vous demande d'arrêter **OU** jusqu'à ce que la victime retrouve une respiration normale, dans ce dernier cas :

9.

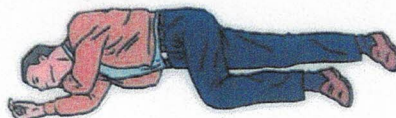

Mettez la victime en PLS et placez votre main sur son ventre pour contrôler sa respiration. Si elle s'arrête de nouveau de respirer, reprenez le massage. **Laissez les électrodes sur le corps du patient, n'éteignez pas l'appareil.**

Corse  
Matériel  
Médical

CC.Moracchini - 20213 FOLELLI

Tel : 04.95.36.86.42

corsematmed@sfr.fr

www.corsematerielmedical.fr